

Confezione M-Mask®
con 1 filtro BFE 98% incluso.



Confezione ricambi filtri BFE 98%
M-Mask® con 10 filtri inclusi.



® Prodotto Registrato - Non è un DPI. Non è un presidio medico.

Prodotto e confezionato da:



Via Liguria, 12 - 10099 San Mauro Torinese
lyo@berrinoprinter.it - www.berrinoprinter.it

Mod. M-Mask® - Rev A 07-2020

PRODOTTO MADE IN ITALY



M-Mask®

Mascherina facciale filtrante e antibatterica.
FILTRO BFE 98% SOSTITUIBILE

UNISEX / LARGE / KIDS 4-8 ANNI / YOUNG 9-14 ANNI



Fibra riciclata



Mantenimento della forma



Morbido



Ultra cloro resistente



Protezione dai raggi UV



Bielastico




Resistente a creme e oli solari



Ultra sottile



Resistente al Pilling

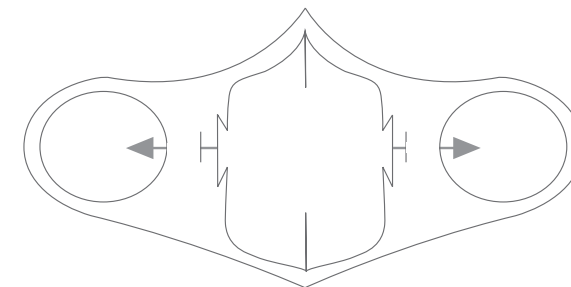

Caratteristiche M-Mask

Vita® 78% Polyester - 22% Elastane
Econyl® tecnotessuto ecosostenibile
realizzato con filo di nylon rigenerato



Caratteristiche filtro interno

100% Polyester BFE 98%



Rapporto di Prova numero 001/2020

Standard EN 14683:2019 - 5.2.2 - Efficienza di filtrazione batterica (BFE) 98%

A seguito delle prove effettuate secondo lo standard EN 14683:2019 (che include il corrigendum di agosto 2019), è risultato che il prodotto sottoposto a test RISPETTA i requisiti di efficienza di filtrazione batterica dello standard (paragrafo 5.2.2 e Appendice B) per il Tipo I e II.

Denominazione del prodotto	Tessuto filtrante					
Azienda Produttrice	Ahlstrom Munksjö					
Descrizione	Fogli di tessuto filtrante in poliestere					
Numero di lotto (batch code)	FF 70/310 PBT PB SMS, PF209234					
Dimensione dell'area di test	50.3 cm ²					
Lato del campione esposto all'aerosol	Non rilevante					
Portata	28.3 ± 0.2 l/min					
Valore medio della conta totale delle piastre dei due controlli positivi	354.5 CFU					
Valore medio della conta totale delle piastre del controllo negativo	4 CFU					
Campione	1	2	3	4	5	M
BFE (%)	94.6	95.8	98.0	97.7	98.6	99.8

Modalità d'uso

Inserire il filtro all'interno della M-Mask® facendo passare le alette nelle apposite fessure della M-Mask®, assicurarsi che la punta più stretta del filtro sia rivolta verso l'alto. Posizionare la mascherina sul viso assicurandosi di coprire bene il naso e agganciarla intorno alle orecchie attraverso gli appositi fori. Non indossarla su epidermide lesa o su ferite. Non è stata testata per fare sport. Sostituire il filtro con uno nuovo non appena è significativamente umido o bagnato, sporco, strappato oppure dopo essere venuti a contatto con persone o ambienti contaminati.

Istruzioni

Non è un prodotto sterile. La mascherina esterna è lavabile (sia a mano che in lavatrice massimo 40°). Il filtro interno può essere utilizzato per 24 ore e poi va sostituito o sanificato. La sua capacità filtrante ai batteri diminuisce con il tempo di utilizzo e con le caratteristiche dell'ambiente esterno.

Taglie e dimensioni

Unisex: 330x150 mm / **Large:** 330x161 mm

Kids 4-8 anni: 247x125 mm / **Young 9-14 anni:** 287x140 mm

Avvertenze

Non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale, ma un prodotto ad uso della collettività ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, N. 18 Art.16, Comma 2. Prima di indossarla igienizzare le mani con apposito prodotto o lavandosi con abbondante sapone e acqua.

Un uso non corretto della mascherina può aumentare, anziché ridurre, il rischio di trasmissione di infezioni. È vietato apportare modifiche al prodotto. Qualsiasi danno derivante dal suo utilizzo, modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.

Smaltire nella raccolta indifferenziata.